


# Medicina polyurethan ernæringssonder med guidewire

Pakningen indeholder sonde, fikseringsplaster, pH teststrimmel og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende b.la. informationer om anlæggelse og sondens størrelse

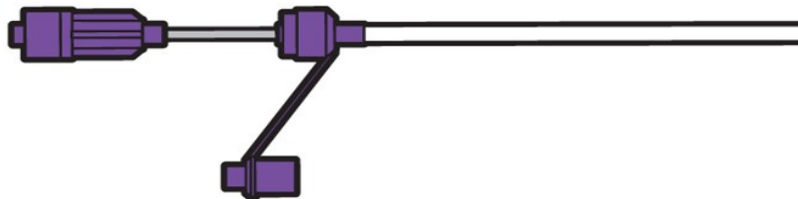

## Anvendelse.

Medicina polyurethan sonde med guidewire er velegnet til langtidsbrug ( bør skiftes efter 60 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for ernæring over en længere periode. Den leveres i 4 forskellige varianter (FR). Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH teststrimmel. KOM ALDRIG VAND I SONDEN/GUIDEWIREN inden korrekt placering er kontrolleret. Guidewiren må aldrig udskiftes eller genanlægges så længe sonden stadig befinder sig i patienten.

## Egenskaber.

Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.

Guidewiren har ENFit holder, som tillader aspiration inden guidewiren fjernes

Guidewiren stopper minimum 2 cm inden de laterale huller, hvorved perforationsskade undgås

Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller

Afstandsmarkeringer (1 cms afstand) til kontrol af sondens beliggenhed

Er fuldt røntgenfast (40% Bariumsulfat ). Lyser tydeligt op ved røntgen

Har ENFit kobling

Størrelserne 8FR og 10FR findes tillige med tungsten

## Sortiment.

		Vægtet/tungsten	
NGP6/55L	6FR x 55 cm (25)		
NGP6/75L	6FR x 75 cm (25)	NGP8/85LW	8FR x 85 cm (25)
NGP6/85L	6FR x 85 cm (25)	NGP10/85LW	10FR x 85 cm (25)
NGP8/55L	8FR x 55 cm (25)		
NGP8/75L	8FR x 75 cm (25)		
NGP8/85L	8FR x 85 cm (25)		
NGP8/120L	8FR x 120 cm (25)		
NGP10/85L	10FR x 85 cm (25)		
NGP10/120L	10FR x 120 cm (25 )		

**H**  
**HARDAM**

Hardam A/S  
Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro  
Telefon 9742 3233  
Email: Post@hardam.dk  
www.hardam-shop.dk

