

# SecuPlast®

## Tætningsring

Ny SecuPlast tætningsring hjælper med at forebygge rød og irriteret hud. SecuPlast tætningsring forebygger lækage som kan skade og irritere huden.

SecuPlast tætningsring formes, modelleres, strækkes/mindskes til den ønskede størrelse og form, så den skaber en individuel, komfortabel og sikker lækagefri barriere.

- Passer til alle typer poser og stomier
- Meget let at forme og modellere til den perfekte form
- Meget let at sætte sammen, hvis den brister under modellering
- Let at dele i mindre stykker, hvis det er nødvendigt
- Utrolig hudvenlig, ingen svie og smerter selv på rød og irriteret hud
- Individuel sikker komfort – SecuPlast Tætningsringe forbliver i den ønskede form og giver en sikker og beskyttende barriere mod lækager.



### Slim

Diameter 50 mm Tykkelse 3,2 mm  
Antal pr. æske: 30 stk




### Standard

Diameter 50 mm Tykkelse 4,0 mm  
Antal pr. æske: 30 stk



### Large

Diameter 100 mm Tykkelse 3,2 mm  
Antal pr. æske: 10 stk

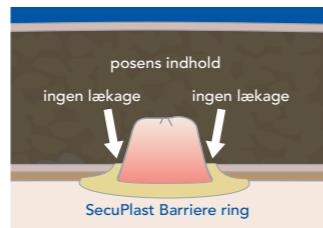

SecuPlast Tætningsringe stopper lækage omkring stomien, ved at lave en sikker, lav barriere ved stomi roden



SECUPLAST HYDRO OG SECUPLAST TÆTNINGSRING			
	<b>Hydro</b>	STØRRELSE:	One size - passer til alle
		ANTAL:	30 stk/æske
		VARENØR:	SPH1
	<b>Slim</b>	DIAMETER:	50 mm
		TYKKELSE:	3,2 mm
		ANTAL:	30 stk/æske
		VARENØR:	SMST
	<b>Standard</b>	DIAMETER:	50 mm
		TYKKELSE:	4,0 mm
		ANTAL:	30 stk/æske
		VARENØR:	SMSS
	<b>Large</b>	DIAMETER:	100 mm
		TYKKELSE:	3,2 mm
		ANTAL:	10 stk/æske
		VARENØR:	SMSL

For yderligere information kontakt venligst **Kirstine Hardam A/S** på tlf: 97-423233 eller besøg os på vores hjemmeside [www.hardam.dk](http://www.hardam.dk)



Kirstine Hardam A/S  
Måbjerg Skolevej 48  
7500 Holstebro  
Tlf/Fax: 97-423233 / 97-428014.  
E-mail: [post@hardam.dk](mailto:post@hardam.dk)  
[www.hardam.dk](http://www.hardam.dk)



British Skin Foundation  
anerkender Salts Healthcare's  
forskning og arbejde for en  
sund hud

Du kan også kontakte din stomisygeplejerske eller forhandler for yderligere information.



[www.salts.co.uk](http://www.salts.co.uk)



British Skin Foundation anerkender  
Salts Healthcare's forskning og  
arbejde for en sund hud



Excellence in stoma care

SecuPlast®  
Hudvenlig hydrocolloid kantsikring og tætningsringe.

STOMI  
TILBEHØR



EKSTRA SIKKERHED

Problemer med klæbeevne, vedhæftning, lækage og hudproblemer er emner som mange stomiopererede kender til.

Salts Healthcare lancerer derfor nu 2 nye produkter.

**SecuPlast Hydro** hudvenlig, hydrokolloid kantsikring og

**SecuPlast Tætningsringe** som giver en sikker tætning omkring stomien og beskytter huden, så du kan føle dig sikker og have en god komfort.

## SecuPlast<sup>®</sup> Hydro

Perfekt sikkerhed har aldrig været mere simpel og effektiv. SecuPlast Hydro kantsikring er en tynd, hudvenlig, hydrokolloid kantsikring som giver en perfekt sikkerhed.

95 % af dem som har prøvet SecuPlast Hydro kantsikring beskriver produktet som komfortabelt.

- Ekstra sikkerhed til alle typer poser og plader uanset producent
- En størrelse passer til alle
- Let at anvende – tynd og fleksibel
- Ikke allergi fremkaldende – anbefales også til dem som er allergisk overfor microporøst plaster
- Bredere end andre produkter, hvilket giver yderligere sikkerhed rundt i klæbekanten.



Én størrelse passer til alle.  
Antal pr. æske: 30 stk



## Sådan anvendes SecuPlast Hydro Kantsikring

Følg blot disse 2 enkle trin.

Det kan ikke blive lettere:



1 Fjern beskyttelsesfilmen.



2 Sæt kantsikringen på i den ønskede position. Halvt på huden, halvt på klæberen. Brug så mange stykker som nødvendigt.

*96 % af brugerne sagde at SecuPlast Hydro er komfortabel og*

*62% fandt SecuPlast Hydro bedre end deres nuværende produkt.*

## Sådan anvendes SecuPlast Tætningsringe

SecuPlast tætningsringe er meget nemme at anvende. De vil ikke miste deres klæbeevne, så du kan modellere dem så meget som du ønsker:

*"Dette produkt er bare perfekt. Det giver mig komfort og sikkerhed mod lækage"*

*"Jeg oplevede ofte lækage om natten. SecuPlast tætningsringe har helt fjernet dette problem for mig. Tusind tak"*

*"Disse tætningsringe har forhindret lækage og gør at jeg kan bære min pose i længere tid"*




1 Fjern beskyttelsesfilmen på begge sider af tætningsringen.



2 Modeller ringen efter dit behov.



3 Kan let rives over og sættes sammen igen - hvis nødvendigt...

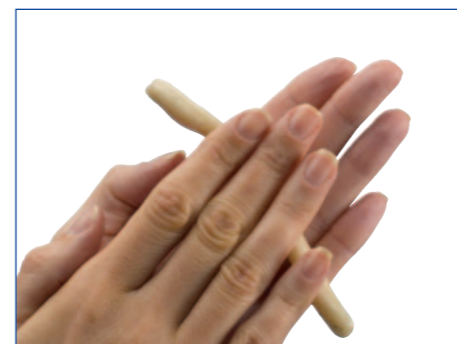

4 ... rulles til en pølse mellem håndfladerne...



5 ...for at lave en tykkere tætningsring...



6 ...eller modeller hullet i midten for at få en tykkere kant.