



## SALTS SECUPLAST® HYDRO

**STØRRELSE:**

En størrelse passer til alle  
Længde: 122 mm, Bredde: 33 mm, Tykkelse: 0,6 mm

**ANTAL:**

30

**VARENDR:**

SPH1DEN



## SALTS SECUPLAST® HYDRO ALOE VERA

**STØRRELSE:**

En størrelse passer til alle  
Længde: 122 mm, Bredde: 33 mm, Tykkelse: 0,6 mm

**ANTAL:**

30

**VARENDR:**

SPHA1DEN



For mere information, kontakt din stomisygeplejerske, forhandler eller Kirstine Hardam A/S.

Kirstine Hardam A/S  
Måbjerg Skolevej 48  
7500 Holstebro  
Tel: 97 42 32 33  
Fax: 97 42 80 14

E-mail: [post@hardam.dk](mailto:post@hardam.dk)

[www.hardam.dk](http://www.hardam.dk)



RM764013 09/10/3K

# SALTS SecuPlast<sup>®</sup>

Hydro & Hydro Aloe Vera<sup>✓</sup>

Behov for ekstra  
sikkerhed – føl dig tryk.



Validating Salts research  
into healthy stoma skin



# Salts SecuPlast® Hydro er det perfekte valg, når der er brug for ekstra sikkerhed.

Hvis der opstår problemer med at, klæberen ikke hæfter så godt langs kanterne, er SecuPlast Hydro en optimal løsning. Sammenlignet med almindelig plaster og klæbere, er SecuPlast Hydro kantsikring meget hudvenlig, meget tynd og meget let at anvende.

## Salts SecuPlast® Hydro findes nu også med Aloe Vera



Hvis huden er følsom, er SecuPlast Hydro Aloe Vera måske et bedre valg. I tusindvis af år har man anvendt Aloe Vera, for de lægende, blødgørende og fugtgivende egenskaber.

SecuPlast Hydro Aloe Vera kan beskytte huden rundt om stomien - lidt mere sikkert, men mere skånsomt for huden.

## To fine produkter, med samme fine egenskaber

For at føle sig sikker, er den enkle og effektive løsning SecuPlast Hydro. Tynd og meget hudvenlig hydrocolloid kantsikring, som er lette at påsætte korrekt.



- Ekstra sikkerhed
- Kan anvendes til alle typer plader og poser
- En størrelse passer til alle
- Let at anvende
- Hudvenlig – kan anvendes af dem som er overfølsomme overfor almindelig plaster
- En smidig form og størrelse giver den bedste pasform



## Salts SecuPlast<sup>®</sup> Hydro er så let at anvende.

Ekstra sikkerhed  
– meget enkelt:



1. Fjern beskyttelsesfilmen



2. Placer SecuPlast Hydro og tryk  
den fast med hånden



3. Anvend en eller flere  
– alt efter behov