

Brugsvejledning

til en-dels og to-delsbandage

Metode

1



1 Lad måleguiden glide ind fra siden.



2 Når begge sider på måleguiden fra siden rammer stomien, aflæs størrelsen som står angivet præcis ved stomien. Dette er den rette størrelse.



3 Fjern beskyttelses papiret bag på Dermacol.



4 Lad Dermacol glide ind over stomien.



5 Fjern beskyttelses papiret på pladen eller posen.



6 Sæt pladen eller posen ovenpå Dermacol.



7 Afslut med at trykke det hele på plads og varme det lidt med hånden. Hvis 2-dels bandage – sæt nu posen fast på pladen.



8 Sådan fjernes Dermacol



9 Pladen eller posen løsnes forsigtigt fra huden...sammen med stomikraven Dermacol.



1 Lad måleguiden glide ind fra siden. Når begge sider på måleguiden fra siden rammer stomien, aflæs størrelsen som står angivet præcis ved stomien. Dette er den rette størrelse.



2 Fjern beskyttelses papiret bag på Dermacol.



3 Placer Dermacol på pladen eller en-dels posen og kontroller at den tynde krave ikke sidder fast på klæberen.



4 Kontroller at Dermacol sidder sikkert.



5 Fjern beskyttelsespapiret bag på Dermacol.



6 Ved behov, skub den tynde stomikrave ind i posen.



7 Forsigtigt placeres hele bandagen over stomien. Afslut med et lille varmende tryk på bandagen.



8 Hele bandagen sidder nu på plads. Hvis 2-dels bandage – sæt nu posen fast på pladen.



9 Sådan fjernes Dermacol
Pladen eller posen løsnes forsigtigt fra huden...sammen med stomikraven Dermacol